

X線・CT検査中のFreeStyle リブレ 2 センサーの取り扱いに関するお知らせ

FreeStyle リブレ 2 は X線・CT検査中も センサーはそのまま



FreeStyle リブレ 2 は、検査中にセンサーを外す必要はありません。



X線・CT検査による
センサーへの
影響はありません



検査前に
センサーを取り外す
必要はありません



検査中も
グルコースモニタリング
を中断しません

FreeStyle リブレ 2 センサーの取り扱いが、より簡単に



最新情報

- 試験により、FreeStyle リブレ 2 センサーはX線検査およびCT検査の影響を受けないことが示されています。
- 患者さんはX線検査およびCT検査中もFreeStyle リブレ 2 センサーを外す必要はなく、装着したままで検査を受けることができます。検査中もグルコースモニタリングは中断されません。
- FreeStyle リブレ 2 センサーを装着したままX線撮影またはCT撮影を受けた場合、撮影部位や撮影条件によっては、センサーが撮影画像に写り込むことがあります。

下記にあてはまるすべての FreeStyle リブレ 2 製品に適用されます。

- ・すでに出荷済みの製品
- ・医療機関に在庫されている製品
- ・患者さんが現在使用中の製品



最新の添付文書はPMDAホームページをご確認ください。▶▶▶ <https://www.pmda.go.jp>
詳細な製品情報はこちら ▶▶▶ <https://myfreestyle.jp>

糖尿病診療に携わる医療従事者向けメールニュース

FreeStyleリブレ ニューストレンド

FreeStyleリブレシステムを糖尿病診療にご活用いただいている
医療従事者の皆さまをサポートするために、
製品の資料ダウンロードや、セミナーの開催予定、デジタルツールの
更新情報、最新情報などをメールでタイムリーにお知らせします。



最新製品情報

FreeStyleリブレシステムに関する最新の製品アップデートをメールでいち早くお届けします。



学会・セミナー情報

FreeStyleリブレシステムに関する最新の学会・Web講演会・セミナー情報などをタイムリーにご案内します。



お役立ちコンテンツ

他施設の運用事例やワークフロー、患者さんのサポート情報、CGMに関する論文紹介など、日々の診療にすぐ活用できる情報を厳選してお届けします。

会員
限定



資料ライブラリ

FreeStyleリブレシステムの製品関連画像や使い方動画などを会員限定でダウンロード※できます。患者指導や院内研修にご活用ください。裏面もご確認ください。

※：ダウンロード資料は随時更新



ご登録はこちらから →

リブレ ニューストレンド

検索



本社：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
東京都港区三田 3-5-27

製造販売元：
アボットジャパン合同会社
ダイアベティスケア事業部
千葉県松戸市松飛台 278

お客様
相談窓口  adc-cs.jp@abbott.com
 0120-37-8055
[営業時間 8:00~20:00(平日)、8:00~17:00(祝日) ※土日除く]


Abbott